

MASCHERA SLEEPWEAVER ÉLAN



Le caratteristiche principali di **SLEEPWEAVER ÉLAN**, maschera nasale per CPAP, sono il cuscinetto di morbido tessuto e i fori di espirazione posti sotto la maschera, per accomodare la naturale esalazione nasale. La maschera è angolata in modo da non infastidire un eventuale partner a letto.

SLEEPWEAVER ÉLAN, come le altre maschere Circadiance, incorpora la rivoluzionaria tecnologia a panno morbido, che si gonfia in silenzio come un palloncino per creare una chiusura ermetica. Questa maschera traspirante ed anallergica è comoda ed elimina le perdite, i punti di pressione, punti dolenti, e i pizzicorii. Questa maschera nasale unica offre il massimo in termini di comfort e elimina i segni delle guarnizioni. Un nuovo design con headgear ampiamente aperto sulla faccia, agevola l'adattamento agli occhiali e permette una visione praticamente totale e senza ostacoli.

Lo starter kit **SLEEPWEAVER ÉLAN** comprende:

- Cuscinetto & Copricapo Medium
- Cuscinetto & Copricapo Large
- Cuscinetto & Copricapo Small
- Tubo SleepWeaver Feather Weight®
- Strap ad apertura facile
- Guida rapida illustrata
- Istruzioni in DVD
- Disponibile nel colore blu



Le misure disponibili sono:
S - M - L

MASCHERA SLEEPWEAVER ELAN

| MATERIALI | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Tessuto cuscinetto | Poliestere - Nylon - Elastam |
| Copricapo | Poliuretano espanso - Nylon - Lycra |
| Gomito | Policarbonato |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Lunghezza (inclusi risvolti) | 45,7 cm |
| Lunghezza (esclusi risvolti) | 37,4 cm |
| Diametro | 15 mm |
| Peso | 36,2 grammi |
| Dimensioni collegamento alla maschera | 22 mm |
| Dimensioni collegamento al tubo | 22 mm |

CURA E PULIZIA

- Lavare a mano con acqua calda (non bollente)
- Utilizzare detergente non abrasivo, antibatterico, o ad alto contenuto di olio
- Non usare shampoo per bambini per pulire la maschera
- Risciacquare bene
- Lavaggio a secco
- Non usare la lavatrice o l'asciugatrice